

MoliCare® Premium Elastic

Descripción general del producto/finalidad prevista

MoliCare® Premium Elastic es un absorbente elástico con bandas laterales elásticas y tiras adhesivas reposicionables que se utilizan para la gestión de la incontinencia. Los absorbentes son adecuados en caso de pérdidas de orina, de incontinencia urinaria y fecal de diversos grados. Estos absorbentes están pensados tanto para personas encamadas como con movilidad. Son productos de un solo uso y deben cambiarse, cuando sea necesario. MoliCare® Premium Elastic puede utilizarse en el contexto de la atención domiciliar y en las instalaciones de asistencia sanitaria. La colocación puede realizarla tanto una persona sin conocimientos médicos como un profesional sanitario.

Uso/indicación

Distintos grados de incontinencia urinaria y fecal



MoliCare® Premium Elastic

Gama de producto*

Envase	Tamaño del producto	S	M	L	XL
	Perímetro de cintura/cadera (cm)	70-90	85-120	115-145	140-175
P30	5 gotas	165 171 165 181	165 172 165 182	165 173 165 183	/
	6 gotas	166 271 165 281	166 272 165 282	166 273 165 283	/
	7 gotas	167 371 165 381	167 372 165 382	167 373 165 383	/
	8 gotas	/	/	/	/
	9 gotas	/	/	/	/
	10 gotas	/	/	/	/
P26	5 gotas	/	/	/	/
	6 gotas	/	/	/	/
	7 gotas	/	/	/	/
	8 gotas	165 471 165 481	165 472 165 482	/	/
	9 gotas	165 571 165 581	165 572 165 582	/	/
	10 gotas	/	/	/	/
P24	5 gotas	/	/	/	/
	6 gotas	/	/	/	/
	7 gotas	/	/	/	/
	8 gotas	/	/	165 473 165 483	/
	9 gotas	/	/	165 573 165 583	/
	10 gotas	/	/	/	/
P22	5 gotas	/	/	/	/
	6 gotas	/	/	/	/
	7 gotas	/	/	/	/
	8 gotas	/	/	/	/
	9 gotas	/	/	/	/
	10 gotas	165 671 165 681	/	/	/
P14	5 gotas	/	/	/	/
	6 gotas	/	/	/	165 274 165 284
	7 gotas	/	/	/	165 374 165 384
	8 gotas	/	/	/	165 474 165 484
	9 gotas	/	/	/	165 574 165 584
	10 gotas	/	165 672 165 682	165 673 165 683	165 674 165 684
P2	5 gotas	165 191	165 192	165 193	/
	6 gotas	165 291	165 292	165 293	165 294
	7 gotas	165 391	165 392	165 393	165 394
	8 gotas	165 491	165 492	165 493	165 494
	9 gotas	165 591	165 592	165 593	165 594
	10 gotas	165 691	165 692	165 693	165 694

*puede que la gama completa no esté disponible en todos los países

MoliCare® Premium Elastic

Producto de un solo uso

Volver a usar un producto sanitario desechable es peligroso. Manipular los productos para volverlos a utilizar puede dañar gravemente su integridad y sus prestaciones. Información disponible bajo solicitud. Volver a usar el producto puede causar contaminación microbiológica e infecciones leves de la piel.

Eliminación del producto

Para minimizar el riesgo de infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes de MoliCare® Premium Elastic deben eliminarse de acuerdo con los procedimientos contemplados en las leyes, normas y reglamentos aplicables sobre prevención de infecciones locales.

Notificación de incidentes

Para un paciente/usuario/tercera persona en la Unión Europea y en países con idéntica normativa (Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios): si, durante el uso de este producto o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, rogamos lo comunique al fabricante y/o su representante autorizado y a las autoridades nacionales.

Características de las prestaciones del producto

Peso total (g)	S	M	L	XL
5 gotas	73,5	85,2	101,6	/
6 gotas	78,0	94,7	108,0	129,9
7 gotas	86,0	103,6	114,3	146,5
8 gotas	93,1	126,2	134,8	161,1
9 gotas	101,0	130,0	151,5	177,9
10 gotas	113,6	168,9	195,2	195,4

* $\leq \pm 10$ % de tolerancia

MoliCare® Premium Elastic

Características de los componentes:

Parte	Material
Lámina posterior:	Polietileno, film laminado tejido no-tejido, blanco
Núcleo absorbente (3 capas):	1. capa: celulosa* 2. capa: celulosa* con polímero superabsorbente 3. capa: celulosa de «fibra rizada» *Blanqueada sin cloro
Adhesivo:	Adhesivo termoplástico
Lámina superior:	Polipropileno tejido no-tejido, hidrófilo, blanco
Barreras:	Polipropileno tejido no-tejido, hidrófobo, blanco
Elásticos:	Elásticos para ajustar las piernas y sujeción
Bandas elásticas laterales con etiquetas reposicionables:	
Material tejido no-tejido:	Polipropileno tejido no-tejido, hidrófobo, blanco
Material elástico:	Polipropileno tejido no-tejido, hidrófobo (elástico), blanco
Etiquetas reposicionables:	Polipropileno tejido no-tejido, cierre tipo velcro
Indicador de humedad:	Tinta hidrosoluble

Características del producto:

Características	Unidad	Talla S 5-10 gotas	Talla M 5-9 gotas	Talla M 10 gotas	Talla L 5-9 gotas	Talla L 10 gotas	Talla XL 6-10 gotas
Longitud total:*	[mm]	720	810	810	925	925	980
Ancho total, parte abdominal:*	[mm]	280	320	440	440	480	480
Ancho total, parte posterior:*	[mm]	290	330	450	450	490	490
Ancho total, zona de la entrepierna:*	[mm]	280	320	290	290	290	320
Longitud del núcleo absorbente:*	[mm]	630	660	650	780	780	780
Ancho del núcleo absorbente, parte abdominal:*	[mm]	200	200	300	200	360	240
Ancho del núcleo absorbente, parte posterior:*	[mm]	220	245	380	265	425	350
Ancho del núcleo absorbente, zona de la entrepierna:*	[mm]	170	170	165	170	160	180

* $\leq \pm 10$ % de tolerancia

Ficha de datos técnicos

MoliCare® Premium Elastic

Etiquetado

N.º de lote con código de 8 dígitos

p. ej.: 900102822



9

001

02

82

2

año 201X

clave interna

clave interna

clave interna

suma de
comprobación
acumulada

Fecha de fabricación

p. ej.: 

2019
año

08
mes

07
día

Usar antes de

p. ej.: 

2024
año

08
mes

01
día

Periodo de validez: 5 años

Producto sanitario

MD

Mantener en lugar seco



No reutilizar



Marcado CE



Fecha de la última revisión: 18-03-2020